



**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios  
AEMPS**

**POSIBILIDAD DE OBTENER UNA LECTURA DE  
GLUCEMIA ERRÓNEAMENTE REDUCIDA CON LAS  
TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK<sup>®</sup> COMPACT, EN  
PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON  
CEFTRIAXONA**

Fecha de publicación: 28 de abril de 2014

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD.  
Referencia: PS, 2/2014

***La AEMPS informa de la posibilidad de obtener una lectura de glucemia erróneamente reducida con las tiras reactivas Accu-Chek<sup>®</sup> Compact, fabricadas por Roche Diagnostics GmbH, Alemania, en pacientes que reciben tratamiento con el antibiótico ceftriaxona, y emite recomendaciones dirigidas a profesionales sanitarios y pacientes.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha sido informada por la empresa Roche Diagnostics GmbH, Alemania, de la posibilidad de obtener una lectura de glucemia erróneamente reducida con las tiras reactivas Accu-Chek<sup>®</sup> Compact, en pacientes que reciben tratamiento con el antibiótico ceftriaxona.

Las tiras reactivas Accu-Chek<sup>®</sup> Compact están destinadas para ser utilizadas con los medidores de glucosa Accu-Chek Compact Plus, dentro del rango de medición de 10–600 mg/dL, y están indicadas para la determinación cuantitativa de los valores de glucemia en sangre capilar fresca.

Roche Diagnostics GmbH ha detectado una limitación de las tiras reactivas Accu-Chek<sup>®</sup> Compact que puede dar lugar a una lectura de glucemia erróneamente reducida en pacientes que reciben tratamiento con ceftriaxona.



